

Щелочной очищающий раствор для биохимических анализаторов Mindray

Инструкция по применению щелочного очищающего раствора для биохимических анализаторов серии BS производства компании Mindray (Кат.№№ В-70455, В-70456)

Аналог очищающего средства "CD80"

НАЗНАЧЕНИЕ

Щелочной очищающий раствор предназначен для обеспечения нормальной работы и получения точных результатов при проведении биохимических исследований биологических материалов на автоматических анализаторах серии BS Mindray. Очищающий раствор эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет и гидравлических систем.

СОСТАВ

Калия гидроксид;
неионные ПАВ;
полианионные ПАВ;
стабилизаторы;
вода деионизованная

<i>Кат. №</i>	<i>Фасовка</i>
В-70455	1000 мл
В-70456	2x1000 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСТВОРА

Щелочной очищающий раствор для анализаторов Mindray необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации соответствующего биохимического анализатора.

Щелочной очищающий раствор должен храниться при температуре 2-35°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца).

Допускается однократное замораживание.

После вскрытия флакона щелочной очищающий раствор можно использовать при температуре окружающей среды (на борту анализатора) в течение всего срока годности.