

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА (КАТ.№ В-43120)

Аналог раствора "Дезинфицирующий раствор REF 0201-0003-001"

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для периодической дезинфекции проточной системы в анализаторах глюкозы и лактата серии Biosen для поддержания высокой точности измерения.

СОСТАВ НАБОРА

Дезинфицирующий раствор
концентрат..... 5x100 мкл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте попадания раствора в глаза и на кожу. При попадании на кожу и слизистую глаз промыть большим количеством проточной воды.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В пробирку с концентратом дезинфицирующего раствора добавить приблизительно 1,5 мл воды.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Старая мембрана, чип-сенсор во время процесса очистки остаётся в приборе. Процедура промывки приводит в негодность мембрану, чип-сенсор, установленные в приборе.

1. Проведение дезинфекции в приборах со специальной функцией очистки

Установите в позицию 1 на тарелке заполненную пробирку с дезинфицирующим раствором. Установите тарелку в прибор.

В меню прибора найдите пункт "очистка" и подтвердите это. После подтверждения прибор принимает на себя общее управление процессом очистки и удаления белков.

Примерно через 20 мин. прибор предложит заменить мембрану, что означает, что процесс очистки завершён. Удалите дезинфицирующий раствор.

2. Проведение дезинфекции в приборах без специальной функции очистки

Отсоедините прибор от сети.

Установите в позицию 37 на тарелке заполненную пробирку с дезинфицирующим раствором. Установите тарелку в прибор.

Открутите крышку с большой ёмкости (с красным кольцом) и установите канюлю – полу иглу в пробирку 37.

Откройте крышку насоса с правой стороны корпуса и проворачивайте против часовой стрелки, пока пробирка не опустеет. Оставьте канюлю с крышкой в пробирке 37.

Через 15 мин. выньте канюлю и тщательно протрите ее влажной без ворсиной тряпкой.

Закрутите крышку большой ёмкости.

Подключите прибор к сети.

В меню прибора найдите пункт "Очистка" и подтвердите.

Подтвердите текст на дисплее "Поставьте ёмкость с моющим средством. Готово".

Затем появятся следующие друг за другом тексты "Система заполняется", "Внимание! Замените мембрану"

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Дезинфицирующий раствор необходимо хранить в плотно закрытых пробирках при температуре 18-25°C в течение всего срока годности (12 месяцев).