

# Детергент промывочный для биохимических анализаторов BioLit

---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕТЕРГЕНТА ПРОМЫВОЧНОГО  
ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ BioLit (BioLit 8020, BioLit  
8060) (КАТ.№ В-72451)

---

## НАЗНАЧЕНИЕ

Детергент промывочный предназначен для обеспечения нормальной работы и получения точных результатов при проведении биохимических исследований биологических материалов на биохимических анализаторах BioLit (BioLit 8020, BioLit 8060).

## СОСТАВ

Детергент промывочный, концентрат:  
Неионные ПАВ из группы полисорбатов;  
вода деионизованная;  
стабилизаторы, консерванты.

*Кат.№*

В-72451

*Фасовка*

500 мл

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

7,5 мл концентрата детергента промывочного разбавить деионизованной водой до 5000 мл. Полученный раствор необходимо использовать в течение 14 суток.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСТВОРА

Рабочий раствор необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации соответствующего биохимического анализатора. Концентрат детергента промывочного должен храниться при температуре 18-25°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Допускается транспортирование при температуре до +35°C в течение 14 дней. Допускается однократное замораживание.

После вскрытия флакона концентрат детергента промывочного можно хранить при температуре 18-25°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности в герметично закрытом флаконе.