

Промывающий раствор №1 для анализаторов гемостаза серии **Systemex CA**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОМЫВАЮЩЕГО РАСТВОРА №1
ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ ГЕМОСТАЗА СЕРИИ SYSMEX CA (CA-560,
CA-620, CA-660, CA-1500, CA-7000) (КАТ.№ В-71351)

Аналог раствора CA CLEAN I, Ref 964-0631-3

НАЗНАЧЕНИЕ

Промывающий раствор предназначен для промывки и дезинфекции гидравлических и дозирующих систем, для предотвращения загрязнения при проведении коагулометрических исследований биологических материалов на анализаторах серии Systemex CA.

СОСТАВ

Натрия гипохлорит < 2,5%.

<i>Кат.№</i>	<i>Фасовка</i>
В-71351	50 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Готов к применению.

Промывающий раствор необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации соответствующего анализатора с периодичностью, установленной производителем анализатора.

Промывающий раствор должен храниться при температуре 2-8°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев).

Допускается транспортирование в течение 14 дней при температуре до +35°C. Допускается однократное замораживание. После вскрытия флакона промывающий раствор можно хранить при температуре 2-35°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение 14 дней в герметично закрытом флаконе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте попадания раствора в глаза и на кожу. При попадании на кожу и слизистую глаз промыть большим количеством воды.

Промывающий раствор №2 для анализаторов гемостаза серии **Systemex CA**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОМЫВАЮЩЕГО РАСТВОРА №2
ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ ГЕМОСТАЗА СЕРИИ SYSMEX CA (CA-560,
CA-620, CA-660, CA-1500, CA-7000) (КАТ.№ В-71352)

Аналог раствора CA CLEAN II, Ref 964-0611-9

НАЗНАЧЕНИЕ

Промывающий раствор предназначен для промывки и дезинфекции гидравлических и дозирующих систем, для предотвращения загрязнения при проведении коагулометрических исследований биологических материалов на анализаторах серии Systemex CA.

СОСТАВ

Соляная кислота < 0,5%;
Неионогенные ПАВ - 0,5%.

<i>Кат.№</i>	<i>Фасовка</i>
В-71352	500 мл

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Готов к применению.

Промывающий раствор необходимо использовать согласно инструкции по эксплуатации соответствующего анализатора с периодичностью, установленной производителем анализатора.

Промывающий раствор должен храниться при температуре 2-35°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев).

Допускается однократное замораживание. После вскрытия флакона промывающий раствор можно хранить при температуре 2-35°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности в герметично закрытом флаконе.