

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ (КАТ.№№ В-10351, В-10352)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для колориметрического определения активности аланинаминотрансферазы по методу Райтмана-Френкеля в сыворотке крови в 200 и 1000 образцах при конечном объеме реакционной смеси 3 мл.

### ПРИНЦИП МЕТОДА

Аланинаминотрансфераза катализирует обратимый перенос аминогрупп аланина на  $\alpha$ -кетоглутаровую кислоту с образованием пировиноградной кислоты, которая определяется фотометрически при 505 нм по реакции с 2,4-динитрофенилгидразином в щелочной среде.

### СОСТАВ НАБОРА

Реагент 1 (P1). Субстратная смесь: L-аланин – 0,1 моль/л, 2-оксоглутарат – 2 ммоль/л, фосфатный буфер – 0,1 моль/л, pH 7,4

Реагент 2 (P2). Раствор 2,4-динитрофенилгидразина – 1 ммоль/л

Реагент 3 (P3). Раствор гидроксида натрия – 8 моль/л.

Калибратор (пируват натрия) – 1 ммоль/л

*Кат.№ Фасовка*

В-10351 P1 1x50 мл + P2 1x50 мл + P3 1x25 мл + калибратор 3 мл

В-10352 P1 1x250 мл + P2 1x250 мл + P3 1x125 мл + калибратор 3 мл

### АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Чувствительность** – не более 50 нмоль пирувата натрия.

**Линейность** – набор обеспечивает линейность при определении содержания пирувата натрия до 250 нмоль с отклонением не более 5%.

**Коэффициент вариации** – не более 5%.

### ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, дозаторы, позволяющие отбирать объемы от 0,01 мл до 5,0 мл, секундомер.

### АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Негемолизированная сыворотка крови. Определение активности АЛТ должно быть проведено в день взятия пробы, поскольку фермент теряет активность как при комнатной температуре (18-25°C), так и при замораживании [1,2].

### ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Приготовление 0,4 М раствора NaOH  
25 мл реагента 3 развести достаточным количеством дистиллированной воды, охладить, довести объем раствора до 500 мл.

### ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Длина волны 505 (490-520) нм.

Кювета с длиной оптического пути 10 мм.

Температура проведения реакции 37°C.

Приготовить пробы в соответствии со схемой определения (объемы компонентов могут быть пропорционально изменены).

#### Схема определения

Раствор	Опытная проба	Холостая проба
---------	---------------	----------------

Реагент 1, мл	0,25	0,25
---------------	------	------

Дистилл. вода, мл	–	0,05
-------------------	---	------

*Пробы перемешать и выдержать при температуре 37°C в течение 1-2 мин.*

Образец, мл	0,05	–
-------------	------	---

*Пробы перемешать и выдержать при температуре 37°C точно 60 мин.*

Реагент 2, мл	0,25	0,25
---------------	------	------

*Пробы перемешать и выдержать при комнатной температуре в течение 20 мин.*

0,4 М раствор, NaOH, мл	2,50	2,50
-------------------------	------	------

*Пробы немедленно перемешать, выдержать при температуре 18-25°C в течение 10 мин. и измерить оптическую плотность опытной пробы относительно холодной*

# КлиниТест-АЛТ

## РАСЧЁТ

Активность аланинаминотрансферазы рассчитать по калибровочному графику.

## ПОСТРОЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНОГО ГРАФИКА

Для построения калибровочного графика приготовить пробы согласно Таблице.

### Таблица

Раствор	Номера проб				
	1	2	3	4	5
Дистиллированная вода, мл	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
Калибратор, мл	–	0,05	0,10	0,15	0,20
Реагент 2, мл	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Все пробы тщательно перемешать и выдержать при комнатной температуре в течение 20 мин.</i>					
0,4 М раствор NaOH, мл	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Все пробы тщательно перемешать, выдержать при комнатной температуре в течение 10 мин. и измерить оптическую плотность проб 2-5 против пробы 1 при 505 нм (490-540 нм).</i>					
Содержание пирувата натрия, нмоль	–	50	100	150	200
Активность фермента, мкмоль/(ч•мл)	–	1	2	3	4
Активность фермента, нмоль/(с•л)	–	278	556	834	1112

По результатам фотометрирования калибровочных проб построить график зависимости оптической плотности от активности фермента. По оси ординат отложить значение оптической плотности, по оси абсцисс – активность фермента (см. Таблицу). Калибровочный график должен иметь вид прямой, выходящей из начала координат.

При активности АЛТ, равной 2-3 мкмоль/(ч•мл) сыворотку развести в 3 раза, равной 2,5-3 мкмоль/(ч•мл) – в 5 раз, равной 3,0-3,5 мкмоль/(ч•мл) – в 5 и 10 раз, равной 3,5-4,0 мкмоль/(ч•мл) – в 10 и 25 раз. Анализ повторить, полученный результат умножить на коэффициент разведения.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание возможного инфицирования при работе с образцами крови необходимо надевать одноразовые резиновые перчатки. При работе с набором необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с едкими и ядовитыми веществами.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Параллельные пробы ставить обязательно.
2. Для приготовления 0,4 М раствора NaOH использовать дистиллированную воду, свободную от карбонатов.

## НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

### Справочно

0,1-0,68 мкмоль/(ч•мл) или 28-190 нмоль/(с•л).

## ЛИТЕРАТУРА

1. Обеспечение качества лабораторных исследований. Преаналитический этап. Под ред. В.В.

Меньшикова, М., 1999, "Лабинформ".

2. Энциклопедия клинических лабораторных тестов. Под ред. проф. Н.У. Тица, М., 1997, "Лабинформ".

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор должен храниться при температуре 2-8°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев).

Допускается хранение и транспортирование набора при температуре до +25°C не более 5 суток.

Допускается однократное замораживание. Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 2-8°C в течение всего срока годности набора.

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества может быть проведён по контрольным сывороткам, аттестованным данным методом.